



StimuLITE®

ÖVERDRAG TILL STIMULITE CONTOURED SITTDYNOR



Fastydd väska med dragkedja för personliga föremål

ÖVERDRAGET SOM KOMPLETTERAR DYNAN

StimuLITE® Contoured sittdynor är gjord för dem som är i behov av en funktionell sittställning med optimal tryckutjämning samt ett svalt sittande med låg luftfuktighet. För att komplettera dynans egenskaper har överdraget designats med en ovan del i slitstarkt Cordura. Under Corduratyget sitter en brandfilt för ökad säkerhet. Sidorna är utrustade med nät för att komplettera dynans ventilerande egenskaper. För att ligga stadigt i stolen har överdraget kardborre på undersidan. Dragkedjan är utrustad med greppring för att enkelt kunna öppnas. Överdraget har ett handtag fram för enkel hantering och en fastsydd ficka för förvaring av personliga ägodelar.

Tvättråd: Dynan och överdraget är tvättbara och tål kontakt med urin och fukt.

- Innan tvätt stäng dragkedjan och sätt samman kardborren.
- Tvätta överdragen i tvättpåse i maskin 40-60°, och torka i torktumlare kallt.
- Sträck dem i vått tillstånd.



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE® sittdynor och överdrag är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



SVENSK MILJÖBAS



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
email: order@rehabshop.com
www.rehabshop.se



Överdragsvarianter till Stimulite® Contoured Sittdynor

| Överdragskod | | Beskrivning |
|--------------|------------------------------|--|
| COV | = Corduraöverdrag | Standardöverdrag för Stimulite sittdynor: Luftig, med oandel i slitstark Cordura, nät på sidorna, brandfilt för ökad säkerhet och perforerad botten. Tvättas i 40-60° C. |
| WCOV | = Ullöverdrag | För extra komfort vid ömtålig hud: Luftig överdrag med hätta i mjuk och stretchbar ullfrotté, nät på sidorna, och perforerad botten. Tvättas i 30-45° C. |
| COVOUT | = Glidöverdrag | För enklare förflyttningar: Luftig och glattare polyester överdrag, nät på sidorna, avtagbar brandfilt för bättre glid och säkerhet, perforerad botten. Tvättas i 40-60° C |
| WPC | = Vattentät inkontinenshätta | Håller dynkroppen ren och torr när fuktuppsamlaren under Stimulite dynan inte räcker till. Andningsaktiv polyuretan med topp i stretchnylon. Tvättas i 60° C. |



Stimulite Överdrag till alla Contoured Sittdynor
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 8cm
Rundad botten +S (CD1414S)

Ersätt COV med en annan överdragskod om du vill beställa ullfrotté- eller glidöverdrag samt vattentät inkontinenshätta (t.ex. WCOVCD1414, COVOUTCD1516S, eller WPC1820)

| Art. Nr. | Storlek | Art. Nr. | Storlek |
|-----------|---------|-----------|---------|
| COVCD1414 | 36x36cm | COVCD1716 | 43x41cm |
| COVCD1416 | 36x41cm | COVCD1717 | 43x43cm |
| COVCD1418 | 36x46cm | COVCD1718 | 43x46cm |
| COVCD1420 | 36x51cm | COVCD1720 | 43x51cm |
| COVCD1516 | 38x41cm | COVCD1816 | 46x41cm |
| COVCD1517 | 38x43cm | COVCD1817 | 46x43cm |
| COVCD1518 | 38x46cm | COVCD1818 | 46x46cm |
| COVCD1520 | 38x51cm | COVCD1820 | 46x51cm |
| COVCD1616 | 41x41cm | COVCD2016 | 51x41cm |
| COVCD1617 | 41x43cm | COVCD2018 | 51x46cm |
| COVCD1618 | 41x46cm | COVCD2020 | 51x51cm |
| COVCD1620 | 41x51cm | | |

Andra storlekar kan fås på beställning.

Stimulite Inkontinensinlägg

Storlek (sittbredd x sittdjup)

Placeras inuti överdraget under dynan

| Art. Nr. | Storlek | Färg |
|----------|----------------------|-------|
| IN 1010 | 26 x 26 cm | Vit |
| IN 1212 | 31 x 31 cm | Vit |
| IN 1414 | 36 x 36 cm | Vit |
| IN 1616 | 41 x 41 cm | Svart |
| IN 1618 | 41 x 46 cm, 46x41 cm | Svart |
| IN 1818 | 46 x 46 cm | Svart |
| IN 2020 | 51 x 51 cm | Vit |



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
email: order@rehabshop.com
www.rehabshop.se