



StimuLITE®

ÖVERDRAG TILL STIMULITE SMART & SPORT SITTDYNOR



Extra tillbehör: Löstagbar väska med dragkedja för personliga förnödenheter, fixeras under dynan med kardborre.
Art. nr. POCKETD

ÖVERDRAGET SOM KOMPLETTERAR DYNAN

StimuLITE® Smart och Sport sittdynor är gjord för dem som är i behov av en funktionell sittställning med optimal tryckutjämning samt ett svalt sittande med låg luftfuktighet. För att komplettera dynans egenskaper har överdraget designats med en ovandel i slitstarkt Cordura. Under Corduratyget sitter en brandfilt för ökad säkerhet. Sidorna är utrustade med nät för att komplettera dynans ventilerande egenskaper. För att ligga stadigt i stolen har överdraget kardborre på undersidan. Dragkedjan är utrustad med greppring för att enkelt kunna öppnas. Överdraget har ett handtag fram för enkel hantering.

Tvättråd: Dynan och överdraget är tvättbara och tål kontakt med urin och fukt.

- Innan tvätt stäng dragkedjan och sätt samman kardborren.
- Tvätta överdragen i tvättpåse i maskin 40-60°, och torka i torktumlare kallt.
- Sträck dem i vått tillstånd.



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE® sittdynor och överdrag är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



SVENSK MILJÖBAS



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
email: order@rehabshop.com
www.rehabshop.se

ÖVERDRAG: SMART & SPORT SITTDYNOR: SMART, SP



Överdragsvarianter till Stimulite® Smart och Sport Sittdynor

Överdragskod	Beskrivning
COVSMRT = Corduraöverdrag, passar både Smart och Sport dynor	Standardöverdrag för Stimulite sittdynor: Luftig, med ovan del i slitstark Cordura, nät på sidorna, brandfilt för ökad säkerhet och perforerad botten. Tvättas i 40-60° C.
WCOVSP = Ullöverdrag, passar både Smart och Sport dynor	För extra komfort vid ömtålig hud: Luftig överdrag med hätta i mjuk och stretchbar ullfrotté, nät på sidorna, och perforerad botten. Tvättas i 30-45° C.
COVSP = Glidöverdrag, passar både Smart och Sport dynor	För enklare förflyttningar: Luftig och glattare polyester överdrag, nät på sidorna, avtagbar brandfilt för bättre glid och säkerhet, perforerad botten. Tvättas i 40-60° C
WPC = Vattentät inkontinenshätt	Håller dynkroppen ren och torr när fuktuppsamlaren under Stimulite dynan inte räcker till. Andningsaktiv polyuretan med topp i stretchnylon. Tvättas i 60° C.



StimulITE Överdrag till alla Smart och Sport Sittdynor
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 5cm
 Ersätt COVSMRT med en annan överdragskod om du vill beställa ullfrotté- eller glidöverdrag samt vattentät inkontinenshätt (t.ex. WCOVSP1414, COVSP1516, eller WPC1820)

Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
COVSMRT1414	36x36cm	COVSMRT1716	43x41cm
COVSMRT1416	36x41cm	COVSMRT1717	43x43cm
COVSMRT1418	36x46cm	COVSMRT1718	43x46cm
COVSMRT1420	36x51cm	COVSMRT1720	43x51cm
COVSMRT1516	38x41cm	COVSMRT1816	46x41cm
COVSMRT1517	38x43cm	COVSMRT1817	46x43cm
COVSMRT1518	38x46cm	COVSMRT1818	46x46cm
COVSMRT1520	38x51cm	COVSMRT1820	46x51cm
COVSMRT1616	41x41cm	COVSMRT2016	51x41cm
COVSMRT1617	41x43cm	COVSMRT2018	51x46cm
COVSMRT1618	41x46cm	COVSMRT2020	51x51cm
COVSMRT1620	41x51cm		

Smart och Sport sittdynor finns enbart med plan botten

Andra storlekar kan fås på beställning.

StimulITE Inkontinensinlägg Storlek (sittbredd x sittdjup) Placeras inuti överdraget under dynan

Art. Nr.	Storlek	Färg
IN 1010	26 x 26 cm	Vit
IN 1212	31 x 31 cm	Vit
IN 1414	36 x 36 cm	Vit
IN 1616	41 x 41 cm	Svart
IN 1618	41 x 46 cm, 46x41 cm	Svart
IN 1818	46 x 46 cm	Svart
IN 2020	51 x 51 cm	Vit



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
 Bultgatan 17
 442 40 KUNGÄLV
 Tel: 031-52 18 95
 email: order@rehabshop.com
www.rehabshop.se