


BRUKARINFORMATION/BRUKSANVISNING

Introduktion

StimuLITE® sittdynor är avsedda för rullstolar och tillverkade för att förebygga trycksår.

De sittdynor som har 2 lager StimuLITE® material, *Slimline™*, *Sport*, *Smart & Silver*, är främst avsedda för att förebygga trycksår. De sittdynorna med 3 lager StimuLITE® material, *Contoured*, *Classic* samt *Classic Barriatric* är avsedda för högriskbrukare.

Alla StimuLITE® produkter är mycket luft- och fuktgenomsläppliga allt för att Du skall sitta torr och sval.

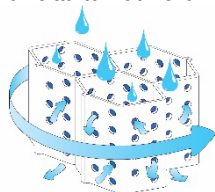

Bruk av dyna

Dynan är tillverkad för att kunna användas i det dagliga livet som rullstolsbrukare. Dynan är mycket tålig och tål vatten. Den tål också vanliga temperaturer från -30° till +60° C.

Innan Du tar din StimuLITE® produkt i bruk skall emballaget tas bort. Dynans överdrag sitter på produkten när den levereras. Produkten fungerar bäst med sitt överdrag på men det är inte farligt att sitta på den utan.

Första användning/utprovning. Kontrollera att Du fått rätt storlek så att den passar bra i Din rullstol. Placera dynan i den stol den skall användas i. Placera dynan med överdraget på med den släta tygsidan uppåt och den avrundade sidan bakåt med uttag för ryggrören.



Kardborrebanden på överdraget skall om möjligt passa med de kardborre som sitter på rullstolens sitsduk. Sittdynans dragkedja skall vara stängd och bakåt mot ryggstödet.

Om din produkt kommer med ett inkontinensskydd skall det placeras med vita sidan upp inuti överdraget under dynan.



När dynan ligger i stolen skall Du sätta dig. Dynan är mycket stabil och tillåter överflyttning i flera steg. Tänk på att byxor med stora bakfickor och stora dekorationer kan orsaka obehag. Dynan är mycket luft- och fuktgenomsläpplig för att Du skall sitta torr och sval. Tänk på detta även vid val av byxor för att få maximal effekt av dynan. När Du sitter över hela sittdynan skall Du inte känna något obehag.

Sitta igenom

Kontrollera regelbundet att Du sitter bra på din dyna. Det görs enklast att Du lutar Dig framåt och känner under sittbensknölna med fingrarna. Känner Du botten bör detta undersökas noggrant av terapeut.

Om du upptäcker olägenheter med din sittdyna eller rodnader på huden, som kvarstår efter 5 minuter, avbryt användningen och kontakta din läkare eller terapeut.

Produktinnehåll

StimuLITE® är tillverkade av 100% TPU. Överdraget består av Cordura® och polyester.

Tvätt-rengöring

StimuLITE® sittdyna kan antingen handtvättas eller tvättas i maskin.



Max 30 min

Max 50°

Använd små mängder kulörtvättmedel utan blekmedel.

Tvätta dyna och överdrag separat i medföljande tvättpåse. Ju oftare du tvättar dynan desto bättre för dynans form och egenskaper.

Kontroll av dyna

Det är lämpligt att regelbundet kontrollera sin sittdyna. Tag då av överdraget och tryck på cellerna med fingrarna. Cellerna skall vara fjädrande spänstiga. Om de inte är det är dynan uttjänt och Du bör då kontakta Din terapeut för ny utprovning. Förväntad livslängd 3-4 år.

Brand och Medicinteknik

Samtliga StimuLITE® sittdynor är brandtestade och CE-märkta enligt MDR (EU) 2017/745

Garanti

2 års garanti gäller för StimuLITE® sittdynor. Garantin inkluderar skador som beror på tillverkning eller materialfel. Garantin täcker inte onormalt handhavande eller förslitningsskador.

När produkten är uttjänt

När produkten är förbrukad lämnas den till plaståtervinning.



Lycka till med din StimuLITE® sittdyna



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
order@rehabshop.com
www.rehabshop.se , www.stimulite.se