

Gäller from 2023-05-01 och tills vidare

KORTINFORMATION

Stimulite® sittdynor är avsedda för att användas i rullstol. Sittdynan är avsedd att användas med överdraget på men det är också möjligt att sitta på den utan överdrag. Dynan skall avemballeras innan den tas i bruk. Lägg den i stolen med dragkedjan bakåt och kardborren nedåt sitsduken.

Tvätt/Rengöring



Max 30 min

Kallt



Kardborre och greppring 1

Tvättråden skall vara bakåt i stolen 1



Inkontinensskydd om det är beställt 1

Nätet ger luft cirkulationsmöjlighet 1

Sätt dig bekvämt, tänk på att använda byxor utan stora fickor eller annat som kan ge tryck på sittytan.

Max brukarvikt

Barndynor (PD, PDCD)	Max 50 kg
Vuxendynor	40 – 130 kg
Classic Bariatric	- 360 kg

StimuLITE® sittdynor innehåller 100% Termoplastisk polyuretan, inga andra tillsatser. Den är inte allergiframkallande.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17

442 40 KUNGÄLV

Tel: 031-52 18 95

order@rehabshop.com

www.rehabshop.se, www.stimulite.se