

PRODUKTINFORMATION

BRUKSANVISNING

Stimulite® sittdynor är avsedda för rullstolar.

- Rund botten för hängmattesits.
- Standardbotten för plan sits.

1. Placera dynan med de öppna cellerna uppåt och den avrundade sidan bakåt med uttag för ryggstödsrören.
2. Kardborrebanden på överdraget placeras under dynan så att dragkedjan kommer baktill.
3. StimuLITE® sittdynor är tillverkade av termoplastisk polyuretanplast (TPU).
4. Överdraget består av Cordura® och polyester.
5. Finns i följande storlekar:

36x36 cm	41x41 cm	46x41 cm
36x41 cm	41x43 cm	46x43 cm
36x46 cm	41x46 cm	46x46 cm
36x51 cm	41x51 cm	46x51 cm
38x41 cm	43x41 cm	51x41 cm
38x43 cm	43x43 cm	51x46 cm
38x46 cm	43x46 cm	51x51 cm
38x51 cm	43x51 cm	

Höjder:

Slimline™	6 cm
Sport	5 cm
Contoured	8 cm
Classic	6 cm
Silver	3 cm
Smart	5 cm
Classic Bariatric	7 cm

6. Vikt beroende på storlek, Slimline™ och Sport ca 1 kg, Classic och Contoured ca 1,5 kg. Bariatric ca 2,9 kg.

7. Brukarvikt ca 130 kg, vid användande av Classic Bariatric ca 360 kg.

8. Inkontinensinlägg vit sida upp!

OBS! Inkontinensskyddet placeras under dynan inuti överdraget.

TVÄTTINSTRUKTIONER FÖR DYNA OCH ÖVERDRAG

StimuLITE® sittdyna kan antingen handtvättas eller tvättas i maskin, beroende på storleken på din tvättmaskin. Dynan och överdraget tvättas separat. Väljer du maskintvätt följ instruktionen här nedan!

Maskintvätt (40°) fintvätt, torktumlas torr/låg värme

Vid tvätt i maskin använd den medföljande tvättpåsen. Använd små mängder kulörtvättmedel utan blekmedel.

Virkonlösning kan användas för att rengöra StimuLITE®-produkter från MRSA-bakterien.

Vid behov kan Stimulite®-produkterna tvättas i 60°, i MAX 30 min.

Både dynan och överdraget kan torktumlas, kallt eller låg värme.

Efter tvätt, sätt på överdraget med dragkedjan bakåt mot den runda baksidan och de öppna cellerna uppåt.

Ju oftare du tvättar dynan desto bättre för dynans form och egenskaper.

SKROTNINGSANVISNING

När produkten är förbrukad lämnas den för plaståtervinning.

MDR2 (EU) 2017/745

CE-märkta enligt denna förordning.

BERÄKNAD LIVSLÄNGD

Beroende på skötsel och användning beräknas Stimulite® sittdynor bibehålla sin funktion 3-4 år

BRANDTEST

Samtliga StimuLITE® sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 och SS-EN 1021. Överdragets flamskydd är ett tunt stretchtyg i kevlar, vilket är fäst under överdragets ovsida. Överdragets tyg består av poröst polyestermaterial som släpper igenom vätska och luft.

GARANTI

2 års garanti gäller för StimuLITE® sittdynor. Garantin inkluderar skador som beror på tillverkning eller materialfel. Garantin täcker inte onormalt handhavande eller förslitningsskador.

VIKTIGT!

StimuLITE® sittdynor är tillverkade för att förebygga trycksår.

De sittdynor som har 2 lager StimuLite® material, *Slimline™*, *Sport*, *Smart & Silver*, är främst avsedd för att förebygga trycksår. De sittdynor med 3 lager StimuLITE® material, *Contoured*, *Classic* samt *Classic Bariatric* är avsedda för högriskbrukare.

Om du upptäcker olägenheter med din sittdyna eller rodnader på huden: Avbryt användningen och kontakta din läkare eller terapeut.

Lycka till med din Stimulite® sittdyna



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17

442 40 KUNGÄLV

Tel: 031-52 18 95

email: order@rehabshop.com

www.rehabshop.se , www.stimulite.se

Med bibehållen CE märkning får Du förändra dynan på följande sätt:

BAKKANT: Man får skära ut för rullstolsrör. Tag då av hörnet på dynan lika stort som röret har i diameter.

Utanför MDR (specialanpassning) tål dynan också följande: Den kan skäras till med en vass kniv, värmekniv eller bandsåg. Dynan "repar" ej upp sig utan bibehåller sin form efter att den är skuren.

SITTBREDD: Du kan skära i längsriktning max 2,5 cm per sida i dynan.

FRAMKANT: Du kan skära av dynan i djupled och Du kan skära olika långt för varje ben om du vill. Gör då ett vertikalt 90° snitt mot skärytan. Max 5 cm totalt i djupled.

DYNANS HÖJD: Det är inte tillåtet att förändra eller skära i sittytan eller på undersidan på dynan. Ej heller att korta hela dynan i bakkant.

