

TEKNISK/-REKOND INFORMATION

Introduktion

Stimulite® sittdynor är avsedda för rullstolar och tillverkade för att förebygga trycksår.

De sittdynor som har 2 lager StimuLITE® material, *Slimline™*, *Sport*, *Smart & Silver*, är främst avsedd för att förebygga trycksår. De sittdynor med 3 lager StimuLITE® material, *Contoured*, *Classic* samt *Classic Bariatric* är avsedda för högriskbrukare.

Utprovninginstruktion

Placera dynan i rullstolen med den släta sidan uppåt och den avrundade sidan bakåt med uttag för ryggstödsrören.

Kardborrebanden på överdraget skall vara på undersidan och dragkedjan skall vara baktill.

Låt personen sitta på dynan minst 30 minuter då den anpassar sig under en första inprovning.



Inkontinensskyddet, om det beställts, placeras under dynan inuti överdraget vit sida upp.

Standard storlekar (cm/tum):

36x36/1414	41x41/1616	46x41/1816
36x41/1416	41x43/1617	46x43/1817
36x46/1418	41x46/1618	46x46/1818
36x51/1420	41x51/1620	46x51/1820
38x41/1516	43x41/1716	51x41/2016
38x43/1517	43x43/1717	51x46/2018
38x46/1518	43x46/1718	51x51/2020
38x51/1520	43x51/1720	

Rund botten för hängmattesits (S)

– Standardbotten för plan sits.

Dynans vikt

Vikt 41x41 cm ca , *Slimline™* och *Sport* 1 kg, *Classic* och *Contoured* 1,5 kg. *Bariatric* 3 kg.

Höjder & art nr:

Artnr = art + storlek i tum, t.ex. **SM1416**

<i>Slimline™</i> (SM och SMXS)	6 cm
<i>Sport</i> (SP)	5 cm
<i>Contoured</i> (CD, CDXS & CDBBXS)	8 cm
<i>Classic</i> (CL och CLXS)	6 cm
<i>Silver</i> (SI)	3 cm
<i>Smart</i> (SMRT)	5 cm
<i>Pediatric Contoured</i> (PDCD)	7 cm
<i>Pediatric Corbee™</i> (PD)	5 cm
<i>Classic Bariatric</i> (CLBA)	7 cm

För artikelnummer till överdrag lägg till COV ex COVCD.

Max brukarvikt

Barndynor (PD, PDCD)	Max 50 kg
Vuxendynor	40 – 130 kg
<i>Classic Bariatric</i>	120 - 360 kg

Innehåll produkt

Stimulite® sittdynor är tillverkade av termoplastisk polyuretanplast (TPU).

Överdraget består av Cordura® Kevlar (brandfilt) och polyester.

Tvätt & rengöring

Stimulite® sittdyna kan antingen handtvättas eller maskintvättas. Gäller både dyna och överdrag.



Max 30 min

Max 50°

Använd kulörtdvättmedel utan blekmedel.

Tvätta dyna och överdrag separat i medföljande tvättpåse. Ju oftare du tvättar dynan desto bättre för dynans form och egenskaper.

Efter tvätt, sätt på överdraget med dragkedjan bakåt mot den runda baksidan och de öppna cellerna uppåt.

Kontroll av dyna

Kontrollera regelbundet sittdynan. Tag då av överdraget och "känn" på cellerna. Det skall vara fjädrande spänstiga. Om de inte fjädrar tillbaka är dynan uttjänt

Rekonditionering

Virkonlösning (och andra klorfria desinfektionsmedel) kan användas för att rengöra Stimulite®-produkter från smuts och bakterier. Tvätta därefter i maskin.

MDR2 (EU) 2017/745

CE-märkta enligt denna förordning.

Beräknad livslängd

Beroende på skötsel och användning beräknas Stimulite® sittdynor bibehålla sin funktion 3-4 år

Brandtest

Samtliga StimuLITE® sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 och SS-EN 1021. Överdragets flamskydd är ett tunt stretchtyg i Kevlar, vilket är fäst under överdragets ovansida.

Garanti

2 års garanti gäller för StimuLITE® sittdynor. Garantin inkluderar skador som beror på tillverkning eller materialfel. Garantin täcker inte onormalt handhavande eller förlitningsskador.

Skrotning

När produkten är förbrukad lämnas den för plaståtervinning.



Lycka till med din Stimulite® sittdyna



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17

442 40 KUNGÄLV

Tel: 031-52 18 95

order@rehabshop.com

www.rehabshop.se, www.stimulite.se

Med bibehållen CE märkning får Du förändra dynan på följande sätt:

BAKKANT: Man får skära ut för rullstolsrör. Tag då av hörnet på dynan lika stort som röret har i diameter.

Utänför MDR (specialanpassning) tål dynan också följande: Den kan skäras till med en vass kniv, värmekniv eller bandsåg. Dynan "repar" ej upp sig utan bibehåller sin form efter att den är skuren.

SITTBREDD: Du kan skära i längsriktning max 2,5 cm per sida i dynan.

FRAMKANT: Du kan skära av dynan i djupled och Du kan skära olika långt för varje ben om du vill. Gör då ett vertikalt 90° snitt mot skärytan. Max 5 cm totalt i djupled.

DYNANS HÖJD: Det är inte tillåtet att förändra eller skära i sittytan eller på undersidan på dynan. Ej heller att korta hela dynan i bakkant.

